



Veltop Cosy 3

Notice de montage

Nous vous remercions d'avoir choisi le modèle Veltop Cosy 3.

Ce produit est conçu, fabriqué et assemblé par la société CYCLO-SYSTEM, située en Haute-Savoie (74).

Pour garantir son bon usage, fonctionnement et assurer une longue vie à votre nouvel accessoire, nous vous remercions de lire et de suivre attentivement les instructions d'emploi et de montage.

Nous vous rappelons que la protection a pour objectif d'apporter à son utilisateur une protection contre la pluie, le froid et le soleil.

Cette version peut être installée sur tous les fauteuils roulants et fauteuils roulants électriques équipés de 2 tubes verticaux ou d'une barre horizontale derrière le siège.


Avertissement

Le non-respect de ce mode d'emploi pourrait entraver le bon fonctionnement de la protection et causer la défaillance de certaines pièces. L'efficacité du système serait alors remise en cause et celui-ci pourrait nuire à la sécurité de vos déplacements.

Deux fixations arrière au choix



Fixation sur les tubes verticaux

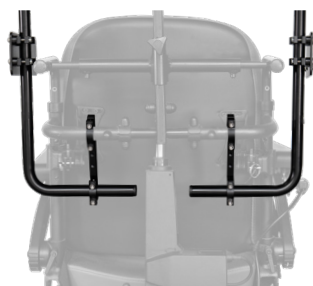

Fixation sur le tube horizontal

Contenu du produit



Partie avant transparente



Partie haute de la protection jambes



Partie basse de la protection jambes



Capote



Tube en L




Deux clés 6 pans



32mm 22mm

Pièces d'accroche

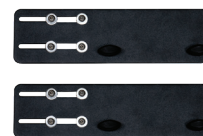

Plaques

Option 1 - Montage sur les 2 tubes verticaux


Placer et serrer les pièces d'accroche (coté 32mm) sur les deux tubes verticaux derrière le siège.



ou

Option 2 - Montage sur le tube horizontal

Placer et serrer les pièces d'accroche (coté 32mm) sur le tube horizontal

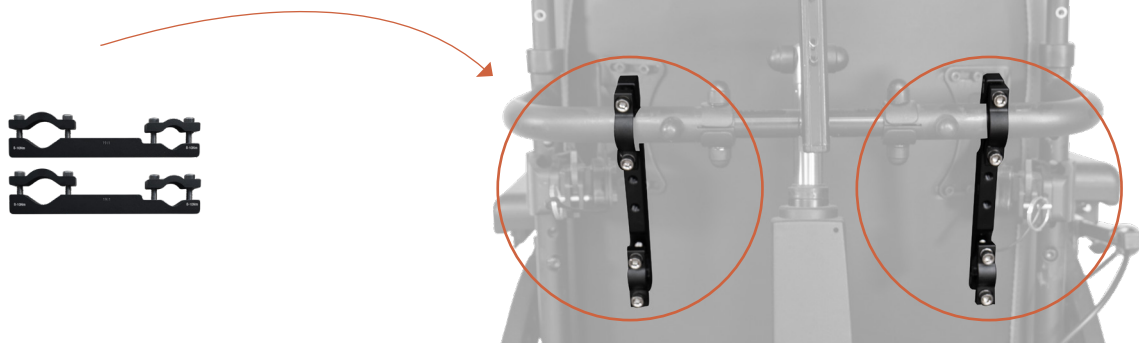

1

Montage des tubes en L

Placer les tubes en L dans les pièces d'accroche, puis resserrer les vis.



2

Montage des plaques

Fixer les plaques sur les tubes en L puis reserrer les vis.

Relever les accoudoirs afin de vérifier qu'ils ne rentrent pas en conflit avec les plaques.



3

Montage de la capote

Faites glisser de haut en bas les 2 plaques de la capote le long de la grande plaque puis serrer les 2 boutons de serrage.



4

Montage de la partie avant transparente


Pour ajouter la protection avant transparente, zipper la fermeture éclair.



5

Montage de la partie haute de la protection jambes

Centrer et fixez la partie haute de la protection jambes puis connecter-la grâce au Velcro à la partie transparente.

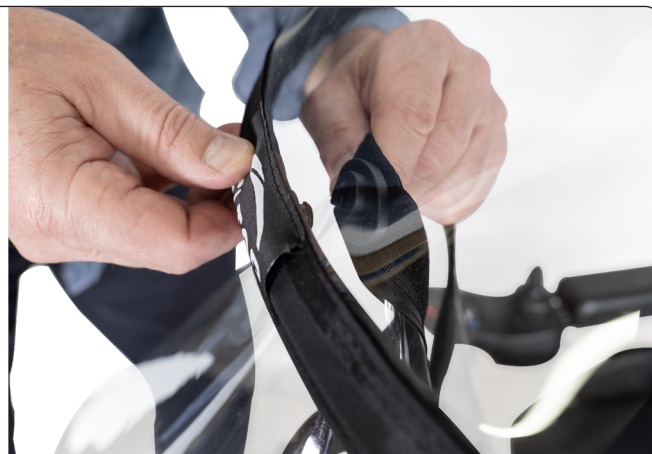

6

Montage de la partie basse de la protection jambes

Zipper la partie basse de la protection pour couvrir le bas des jambes et obtenir la protection intégrale.



Configurations



Réglages

Vous pouvez facilement ajuster la hauteur de la capote en modifiant le positionnement de la grande plaque sur le tube vertical. La capote doit se situer le plus proche possible de la tête. La largeur entre les 2 grandes plaques ne doit pas dépasser la largeur du fauteuil.



CYCLO-SYSTEM

3621 route d'Albertville
74320 SEVRIER
FRANCE

T : 0033 (0)4 50 77 56 17
F : 0033 (0)4 50 63 45 36
info@veltop.com
www.veltop.eu



Ref. VELCOSY3