



Veltop Comfort Mobil

Notice de montage



Nous vous remercions d'avoir choisi le modèle Veltop Comfort Mobil.

Ce produit est conçu, fabriqué et assemblé par la société CYCLO-SYSTEM, située en Haute-Savoie (74).

Pour garantir son bon usage, fonctionnement et assurer une longue vie à votre nouvel accessoire, nous vous remercions de lire et de suivre attentivement les instructions d'emploi et de montage.

Nous vous rappelons que la protection a pour objectif d'apporter à son utilisateur une protection contre la pluie, le froid et le soleil.

Ce modèle peut être installé sur tous les scooters électriques PMR équipés d'un panier amovible à l'avant et d'un appui tête ou d'un tube carré sous le siège à l'arrière.

Avertissement

Le non-respect de ce mode d'emploi pourrait entraver le bon fonctionnement de la protection et causer la défaillance de certaines pièces. L'efficacité du système serait alors remise en cause et celui-ci pourrait nuire à la sécurité de vos déplacements.

Deux fixations arrière au choix



Fixation appui tête



Fixation tube carré sous le siège

Comfort Mobil - A



Capote + Casquette



Clé plate



Tube support capote



Clés 6 pans

Comfort Mobil - B



Capote



Clé plate



Tube support capote



Clés 6 pans



Déflecteurs



Protection avant

Comfort Mobil - C



Capote



Clé plate



Tube support capote



Clés 6 pans



Déflecteurs



Protection avant



Bouclier avant en polycarbonate



Vis

1 Montage fixations arrières

Montage de la fixation sur appui tête

Retirer l'appui tête, introduisez les 2 tubes entre les 2 plaques de la fixation, puis remplacez l'appui tête dans son logement.

Centrez la fixation et serrez ensuite les 3 vis à l'aide de la clé 6 pans et d'une clé plate de 10.



Montage de la fixation sur le tube carré sous le siège

Introduisez le tube carré soudé sur la plaque dans le tube situé sous le fauteuil. Serrez ensuite la vis de serrage du tube carré du fauteuil pour consolider l'ensemble.

Positionnez et vissez le tube verticalement à l'aide des 2 vis de telle façon à ce que celui-ci se retrouve au milieu du fauteuil.



2 Montage du tube support de capote

Retirez les 2 demi-coquilles des pièces d'accroche du bas puis positionnez et centrez horizontalement le tube. Remplacez les 2 demi-coquilles puis serrez fort.



3 Mise en place de la capote

Positionner et introduisez les plaques de la capote dans les 2 supports au bout du tube puis serrez les 2 boutons de serrage.



4

Mise en place de la protection avant transparente (configuration B)

Reliez la protection avant avec la capote à l'aide de la fermeture éclair, puis placer les 2 protections latérales. A l'arrière de la capote, passez la sangle sous le tube et clipsez pour maintenir la capote.



5

Mise en place du bouclier avant (configuration C)

Retirez le support du panier. Placez et positionnez le bouclier avant le plus haut possible à quelques centimètres de la protection avant transparente. Si nécessaire, placer les entretoises fournies entre la console du scooter et le bouclier en polycarbonate, si celui-ci doit être éloigné.

Remplacez le support du panier devant le bouclier puis serrez à l'aide des 2 ou 4 vis du scooter ou avec celles fournies.



Réglages

Vous pouvez régler la hauteur de la capote en modifiant le positionnement

- des pièces d'accroche situées sur la plaque fixée sur l'appui tête (version 1)
- de la plaque fixée sur le tube carré vertical (version 1bis)

Vous pouvez également modifier légèrement l'angle du tube support de la capote en desserrant les pièces d'accroche à l'arrière.

La capote doit se positionner à 5cm au-dessus de la tête pour optimiser la protection.



Configurations possibles



CYCLO-SYSTEM

3621 route d'Albertville
74320 SEVRIER
FRANCE

T : 0033 (0)4 50 77 56 17
F : 0033 (0)4 50 63 45 36
info@veltop.com
www.veltop.eu

VELTOP.eu
WEATHER PROTECTION



CE

Ref. VELCM