



Veltop Cosy 3

Montage -und Gebrauchsanweisung



Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das Modell Veltop Cosy 3 entschieden haben.

Dieses Produkt wurde von der Firma CYCLO-SYSTEM im französischen Département Haute-Savoie (74) entworfen, hergestellt und zusammengebaut.

Um den korrekten Gebrauch, die Funktion und eine lange Lebensdauer Ihres neuen Zubehörs zu gewährleisten, bitten wir Sie, die Gebrauchs- und Montageanleitung aufmerksam zu befolgen.


Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Schutz dazu dient, dem Benutzer Schutz vor Regen, Kälte und Sonne zu bieten.

Diese Version kann an allen Rollstühlen und Elektrorollstühlen angebracht werden, die mit 2 vertikalen Rohren oder einer horizontalen Stange hinter dem Sitz ausgestattet ist.

Warnhinweis

Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann die ordnungsgemäße Funktion des Schutzes beeinträchtigen und zum Ausfall von Teilen führen. Dies würde die Wirksamkeit des Systems in Frage stellen und es könnte Ihre Sicherheit beim Reisen beeinträchtigen.


2 rückseitigen Befestigungs-Arten zur Wahl im Lieferumfang enthalten

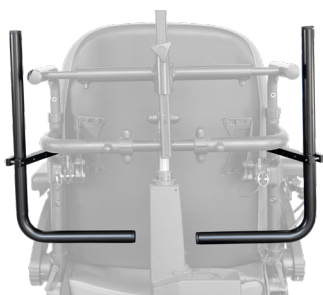


Befestigung an den 2 vertikalen Rohren



Befestigung an der horizontalen Stange

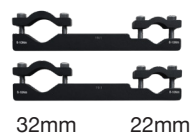

2 Befestigungsteile

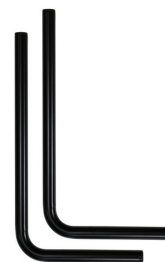

2 L-förmige Rohre

Cosy 3 - A



Verdeck



10-mm-
Maulschlüssel



2 Platten



2
Sechskantschlüsseln

Cosy 3 - B



Verdeck



10-mm-
Maulschlüssel



2 Platten



2
Sechskantschlüsseln



Transparenter
vorderer Teil

Cosy 3 - C



Verdeck



10-mm-
Maulschlüssel



2 Platten



2
Sechskantschlüsseln



Oberer Teil des
Beinschutz





Unterer Teil des
Beinschutz



Transparenter
vorderer Teil

Option 1 - Montage an den 2 vertikalen Rohren


Setzen Sie die Befestigungsteile (Seite 32 mm) an den beiden vertikalen Rohren hinter dem Sitz und ziehen Sie sie fest ein.

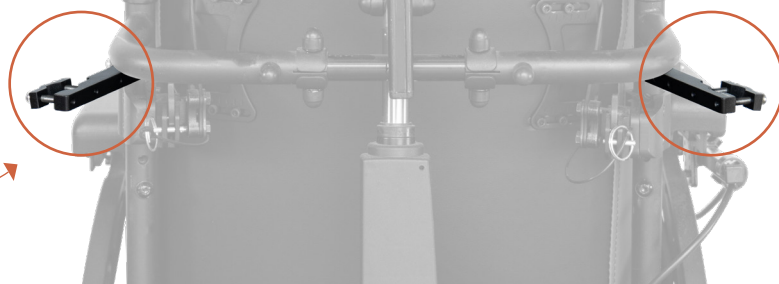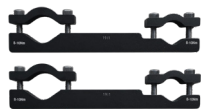

oder

Option 2 - Montage am horizontalen Rohr

Placer et serrer les pièces d'accroche (coté 32mm) sur le tube horizontal

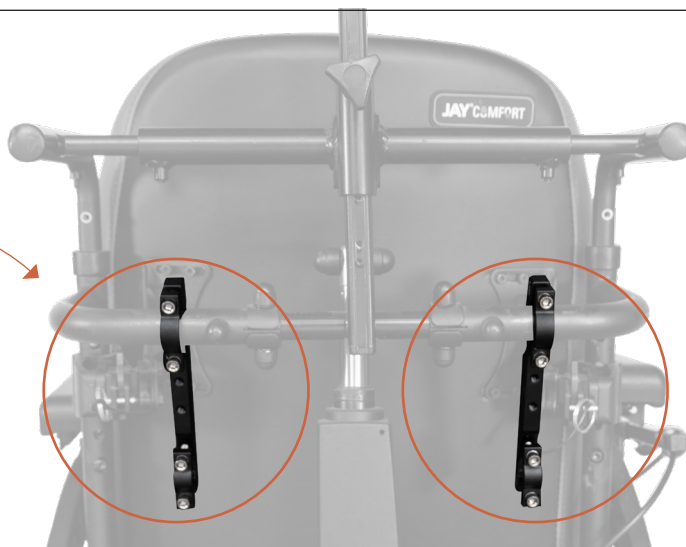

1 Montage der L-förmigen Rohre

Setzen Sie die L-Rohre in die Befestigungsteile (Seite 22mm) ein und ziehen Sie die Schrauben fest.



2 Montage der Platten

Setzen Sie die Platten mit den beiden Halbschalen oben in die Rohre ein und achten Sie dabei darauf, dass die hochgeklappten Armlehnen nicht mit den Platten kollidieren.

Die Platten müssen parallel zum Boden verlaufen und auf beiden Seiten auf die gleiche Höhe eingestellt sein.



3

Montage des Verdecks

Schieben Sie die beiden Platten des Verdecks entlang der großen Platten und ziehen Sie dann die beiden die Klemmschrauben fest.

Wenn die Rückenlehne des Sessels ständig nach hinten geneigt ist, können Sie den Winkel der Platten so einstellen, dass diese und das Verdeck stets parallel zum Boden bleiben.



4

Montage des transparenten Vorderteils

Das Vorderteil wird mit Hilfe des Reißverschlusses angebracht.



5

Montage des oberen Teils des Beinschutzes

Zentrieren Sie den oberen Teil des Beinschutzes und verbinden Sie ihn mit Hilfe des Klettverschlusses an dem transparenten Teil.



6

Montage des unteren Teils des Beinschutzes

Verbinden Sie den unteren Teil des Schutzes mit Hilfe des Reißverschlusses, um die Unterseite der Beine zu bedecken.



Konfigurationen



Einstellungen

Sie können die Höhe des Verdecks leicht anpassen, indem Sie die Position der großen Platte auf dem Standrohr verändern.

Das Verdeck sollte sich so nah wie möglich am Kopf befinden.

Die Breite zwischen den beiden Platten sollte nicht größer sein als die Breite des Rollstuhls.

Sie können die große Platte auch nach hinten verschieben, falls sie im Bereich der Arme stört, indem Sie die beiden Halbschalen auf den vorderen Teil setzen.



CYCLO-SYSTEM

3621 route d'Albertville
74320 SEVRIER
FRANCE

T : 0033 (0)4 50 77 56 17

F : 0033 (0)4 50 63 45 36

info@veltop.com

www.veltop.eu



Ref. VELCOSY3